



# Prevena™

Incision Therapy



## VERKORT OVERZICHT

### PREVENA™ 125 THERAPY UNIT SYMBOLEN EN ALARMEN



Waarschuwingssymbool



Hoorbaar alarm (gedempt)



Batterij niveau

Dit is een verkort overzicht, meer details vindt u in het PREVENA™ Systeem Overzicht Zorgverleners

| Soort alarm                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hoe oplossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Lekkage alarm</b><br/>Eén piep, één geel lampje (continu brandend)</p>                                                                                                                           | <p>Om te controleren of het PREVENA™ Incisie verband goed is aangesloten, heeft de PREVENA™125 Therapy Unit de VISICHECK™ functie. Druk tweemaal op de AAN/UIT knop.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Eén lampje: Optimaal</li><li>- Twee lampjes: Goed</li><li>- Drie lampjes: Marginaal</li></ul> <p>Wanneer de VISICHECK™ functie een “marginale” afdichting aangeeft, volg onderstaande stappen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Controleer of de opvangbeker goed is aangesloten (klik)</li><li>- Controleer de slangaansluiting dat deze goed zijn zijn aangesloten</li><li>- Strijk rimpels in de folie glad met je vingers</li><li>- Gebruik PREVENA™ folie strips (ingesloten in de verpakking) om lekkages te dichten.</li><li>- Druk langzaam stevig op de randen van het verband</li></ul> |
| <p><b>Opvangbeker vol alarm</b><br/>Twee piepjes, één geel lampje (continu brandend)</p>                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Controleer het vloeistof niveau in de opvangbeker</li><li>2. Als de opvangbeker niet vol is, controleer de slangen op knikken of afsluitingen</li><li>3. Als de opvangbeker vol is, zet het pompje uit</li><li>4. Breng een nieuwe opvangbeker aan wanneer de therapie moet worden voortgezet</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Batterij alarm</b><br/><b>Laag-</b> Eén langzame piep, één geel lampje<br/><b>Kritiek-</b> Eén snel herhalend harder wordende piep, één geel lampje</p>                                        | <p>In het pompje zitten al drie AA batterijen</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Houd 5 seconden ingedrukt om uit te zetten</li><li>2. Druk en duw op het deksel aan de achterkant om het pompje te openen</li><li>3. Breng 3 AA batterijen aan (lithium batterijen aanbevolen)</li><li>4. Druk en duw om het deksel te sluiten</li><li>5. Houd 2 seconden ingedrukt om aan te zetten</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Systeemfout alarm</b><br/>Eén snel herhalend harder wordende piep, twee gele lampjes</p>                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Houd 5 seconden ingedrukt om uit te zetten</li><li>2. Houd 2 seconden ingedrukt om weer aan te zetten</li><li>3. Als het systeem nog steeds niet functioneert, neem contact op met de behandelaar of GD Medical op 040- 3031099</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Maximale levensduur pomp bereikt:</b> drie lampjes branden om aan te geven dat de maximale duur bereikt is. Er is een continue piep gedurende 15 seconden en dan zal het systeem uitgaan.</p>  | <p>Neem contact op met de behandelaar of GD Medical op 040- 3031 099</p> <p>Levensduur=192 uur (acht dagen)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



NB: Er bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie voor PREVENA™ Therapy. Raadpleeg de van toepassing zijnde PREVENA™ System gebruikersinstructie voor de zorgverlener voorafgaand aan gebruik.

Copyright 2017 KCI Licensing, Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle hier genoemde handelsmerken zijn eigendom van van KCI Licensing, Inc., haar dochterondernemingen en/ of licentiehouders. PRA001264-R0-0US, NL (10/17)

