

Stroomaansluiting

Touchscreen

**3M**

**ACTIV.A.C.™**  
Therapiesysteem

Verkorte  
handleiding

Opvangbeker

Aan/uit-knop

Schermmodus  
Huidige datum  
Huidige tijd

Geluidssignaal dempen

Therapie Aan/Uit

Ronddraaiend pictogram =  
Negatieve druk is actief

Help

Accuniveau



58:23

Patiëntmodus  
Jul 19 2009  
18:06

Aan/Uit

Audiopauze

Continu

Therapie Uit

0mmHg

Schermb beveiliging

## Voordat u de ACTIV.A.C.™ Therapy Unit gaat gebruiken

Neem deze verkorte handleiding door. U dient deze handleiding in het zijvak van de therapy unit-draagtas te bewaren.

Neem de gebruikershandleiding met uw arts of verpleegkundige door.

**Neem het veiligheidsinformatieblad met uw arts of verpleegkundige door. Dit blad wordt eveneens bewaard in het daarvoor bestemde vak in de draagtas van de therapy unit.**

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor veelgestelde vragen over de ACTIV.A.C.™ Therapy Unit.

**In het geval van een noodgeval neemt u contact op met uw arts of uw plaatselijke noodnummer.**

## V.A.C.® Therapy starten

Houd de aan/uit-knop ongeveer twee seconden ingedrukt om de therapy unit in of uit te schakelen.



Druk op de knop om de therapie te starten of te stoppen.

Groen = aan, Grijs = uit

## Bevestigingsscherm

Er verschijnt een bevestigingsscherm wanneer het apparaat detecteert dat de aan/uit-knop is ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Dit alarm gaat gepaard met een geluidssignaal.



Druk op **Ja** om het apparaat uit te schakelen. Druk op **Nee** om terug te gaan naar het **startscherm**.

## Opvangbeker verwijderen



Druk de ontgrendeling van de opvangbeker omlaag.

Trek de opvangbeker direct weg van de therapy unit.

## Opvangbeker plaatsen



Schuif de opvangbeker over de geleider voor de opvangbekervergrendeling.

Draai de opvangbeker niet.

Druk de opvangbeker stevig op de therapy unit totdat u een klik hoort.

## Waarschuwingen en alarmen

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.



**Manufactured For:**

KCI USA, Inc.  
12930 IH 10 West  
San Antonio, TX 78249  
USA  
+1-800-275-4524 (alleen VS)  
<https://hcbgulatory.3m.com>

**KCI** *maakt nu deel  
uit van 3M*



KCI Manufacturing  
IDA Business & Technology Park  
Dublin Road, Athlone,  
Co. Westmeath, Ireland

© Copyright 2020 3M. Alle rechten voorbehouden.  
3M, ACTIV.A.C., en de andere weergegeven merken  
zijn merken of geregistreerde merken. Ongeoorloofd  
gebruik verboden.  
418439-NL Rev B 6/2020