



VOYANTS ET ALARMES DE L'APPAREIL DE THÉRAPIE PREVENA™ 125



Voyant d'avertissement

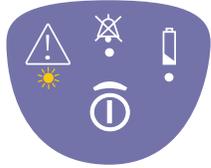
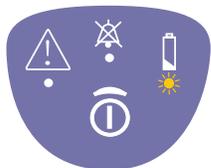
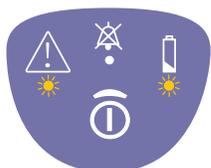
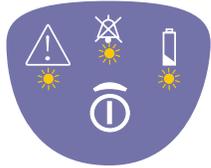


Alarme sonore (interrompue)



Niveau de charge de la batterie

Ceci est un guide rapide. Pour plus d'informations, consultez le guide des cliniciens du système PREVENA™

Type d'alarme	Résolution du problème
<p>Alarme de prise d'air Un signal sonore, un voyant jaune continu.</p> 	<p>Pour vérifier l'application correcte du pansement pour incisions PREVENA™, l'appareil de thérapie PREVENA™ 125 est équipé de la fonctionnalité VISICHECK™. Presser deux fois sur le bouton Marche/Arrêt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un voyant : Excellent - Deux voyants : Bon - Trois voyants : Minime <p>Si la fonctionnalité VISICHECK™ indique un taux de prise d'air « Minime », procéder comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérifier que le réservoir est verrouillé dans l'appareil. - Vérifier les connecteurs de tubulure afin de garantir qu'ils sont complètement engagés et verrouillés. - Lisser les éventuels plis dans l'adhésif à l'aide du doigt. - Utiliser les bandelettes adhésives PREVENA™ (placées dans l'emballage du pansement) pour aider à assurer l'étanchéité autour du pansement. - Appuyer fermement sur les bords du pansement.
<p>Alarme de réservoir plein Deux signaux sonores, un voyant jaune continu.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier le niveau de liquide dans le réservoir. 2. Si le réservoir n'est pas plein, vérifier l'absence de pliure ou de pincement des tubulures. 3. Si le réservoir est plein, mettre l'appareil hors tension. 4. Contacter le représentant local.
<p>Alarme de batterie faible Faible - Un signal sonore long, un voyant jaune continu. Critique - Un signal sonore, répété rapidement, dont le volume augmente, deux voyants jaunes continus.</p> 	<p>Cette unité de thérapie est livrée avec trois piles AA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maintenir le bouton enfoncé pendant cinq secondes pour éteindre l'unité. 2. Pousser en appuyant sur le panneau à l'arrière de l'unité pour l'ouvrir. 3. Introduire trois piles AA (piles au lithium de préférence). 4. Pour fermer le panneau, le pousser en appuyant dessus. 5. Maintenir le bouton enfoncé pendant deux secondes pour mettre en marche l'unité.
<p>Alarme d'erreur du système Un signal sonore, répété rapidement, dont le volume augmente, deux voyants jaunes continus.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maintenir le bouton enfoncé pendant cinq secondes pour éteindre l'unité. 2. Maintenir le bouton enfoncé pendant deux secondes pour remettre en marche l'unité. 3. Si l'unité de thérapie ne fonctionne toujours pas, contacter le représentant local.
<p>Fin de la durée de vie du dispositif Trois voyants allumés indiquent que le cycle est terminé. Un signal sonore répétitif durera pendant 15 secondes puis l'unité s'éteindra.</p> 	<p>Contactez le représentant local.</p> <p>Cycle de vie = 192 heures (huit jours)</p>

REMARQUE : il existe des indications, contre-indications, avertissements, précautions, et informations de sécurité propres à la thérapie PREVENA™. Veuillez consulter les instructions du guide des cliniciens du système PREVENA™ applicables avant l'application.

©2018 KCI Licensing, Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de KCI Licensing, Inc., de ses filiales et/ou de ses concédants de licence. PRA-PM-FR-00014 (06/18)