
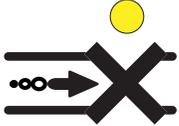
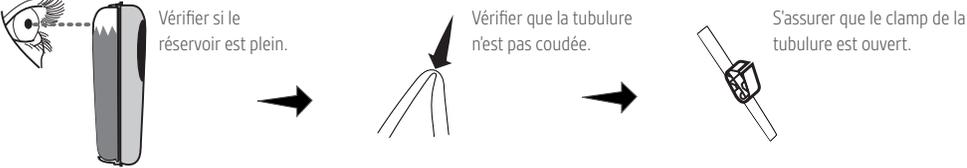
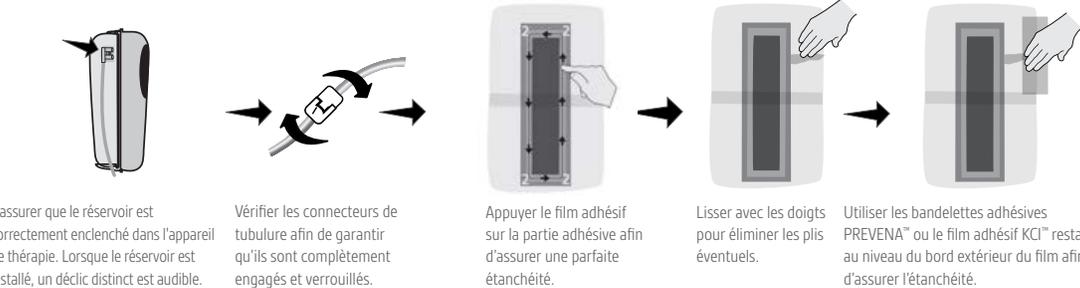
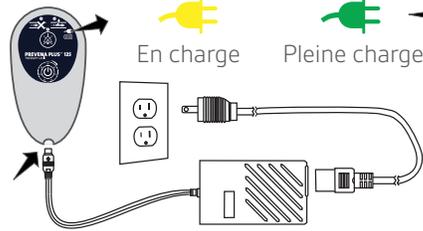
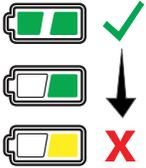


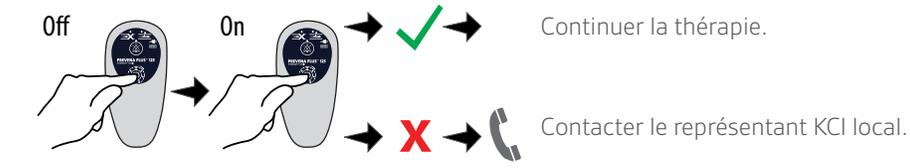

Type d'alarme	Résolution du problème
Alarme de blocage  L'alarme sonore de blocage émet deux signaux sonores toutes les 15 secondes.	 <p>Vérifier si le réservoir est plein.</p> <p>Vérifier que la tubulure n'est pas coudée.</p> <p>S'assurer que le clamp de la tubulure est ouvert.</p>
Alarme de prise d'air  L'alarme de prise d'air émet deux signaux sonores toutes les 15 secondes.	 <p>S'assurer que le réservoir est correctement enclenché dans l'appareil de thérapie. Lorsque le réservoir est installé, un déclic distinct est audible.</p> <p>Vérifier les connecteurs de tubulure afin de garantir qu'ils sont complètement engagés et verrouillés.</p> <p>Appuyer le film adhésif sur la partie adhésive afin d'assurer une parfaite étanchéité.</p> <p>Lisser avec les doigts pour éliminer les plis éventuels.</p> <p>Utiliser les bandelettes adhésives PREVENA™ ou le film adhésif KCI™ restant au niveau du bord extérieur du film afin d'assurer l'étanchéité.</p>
Alarme de batterie faible  L'alarme émet deux signaux sonores toutes les quatre minutes.	 <p>En charge</p> <p>Pleine charge</p> <p>Connexion à l'alimentation</p>  <p>Pleine charge (environ 9 heures restantes)</p> <p>Batterie à moitié chargée (environ deux à sept heures restantes)</p> <p>Charge faible (environ deux heures de thérapie restantes). Charger immédiatement l'appareil pour éviter l'interruption de la thérapie.</p>
Alarme d'erreur du système  Tous les voyants clignotent et deux signaux sonores se répètent toutes les 15 secondes.	<p>Arrêter puis redémarrer l'appareil de thérapie.</p>  <p>Off</p> <p>On</p> <p>Continuer la thérapie.</p> <p>Contacter le représentant KCI local.</p>
Bouton d'interruption d'alarme 	<p>Appuyer pendant trois secondes au centre du bouton d'interruption d'alarme pour interrompre l'alarme sonore pendant deux minutes. Une fois activé, le bouton d'interruption d'alarme s'allume pour indiquer que l'interruption de l'alarme a été sélectionnée. L'alarme sonore se répétera au bout de deux minutes, à moins que le problème ne soit résolu.</p>
Fin de la thérapie 	<ul style="list-style-type: none"> Un voyant jaune situé au-dessus de l'indicateur de cycle de vie de la thérapie s'allume en continu. L'appareil de thérapie émet huit signaux sonores suivis d'un signal sonore continu de cinq secondes. Ensuite, il s'éteint. Prévenir le médecin référent ou le personnel soignant : si l'appareil de thérapie est arrivé en fin de cycle après sept jours d'utilisation et que le patient tente de l'allumer, l'appareil émet une alarme pendant trois secondes avant de s'éteindre automatiquement.

REMARQUE : il existe des indications, contre-indications, avertissements, précautions, et informations de sécurité propres à la thérapie PREVENA™. Veuillez consulter les instructions du guide des cliniciens du système PREVENA™ applicables avant l'application.

©2018 KCI Licensing, Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de KCI Licensing, Inc., de ses filiales et/ou de ses concédants de licence. PRA-PM-FR-00014 (06/18)