

Unité de thérapie V.A.C.Ultra avec thérapie V.A.C.

Unité de thérapie V.A.C.Ultra™




Installation de l'unité de thérapie

1. Fixer le réservoir.



Thérapie V.A.C.® : réservoir de 500 mL ou 1 000 mL (soins intensifs uniquement)

2. Raccorder la tubulure du pansement (après application du pansement). Aligner, pousser et tourner.

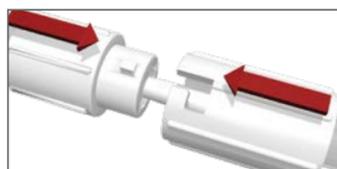


REMARQUE : consulter le mode d'emploi pour des informations complètes sur l'application du pansement.

Instauration de la thérapie V.A.C.®

Appuyer sans relâcher sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce qu'il s'allume.




Écran de sélection de la thérapie

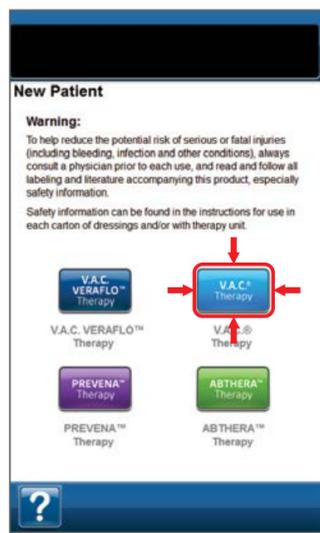

Sélectionner **V.A.C.® Therapy** (Thérapie V.A.C.®)

Écran Confirm Settings (Confirmer les paramètres)

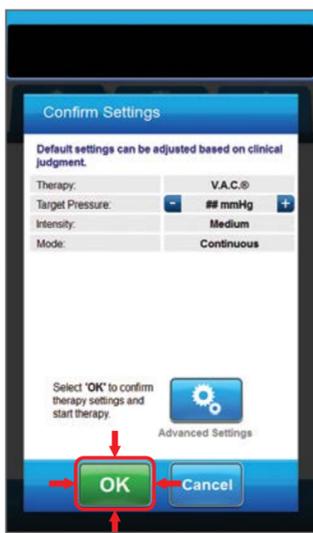

Sélectionner **OK** pour accepter les paramètres par défaut

Écran SEAL CHECK™ Leak Detector (Détecteur de fuite SEAL CHECK™)



L'aspiration commence

Écran d'accueil V.A.C.® Therapy (Thérapie V.A.C.®)



La thérapie V.A.C.® démarre

Caractéristiques améliorées

Système de détection précoce (SDP) de prélocalisation de fuites

Écran d'accueil V.A.C.® Therapy (Thérapie V.A.C.®)



L'encadré jaune autour du pansement avertit l'utilisateur de la présence de fuites et une alarme retentit rapidement si cela n'est pas corrigé

Thérapie DYNAMIC PRESSURE CONTROL™

Écran des paramètres avancés de la thérapie V.A.C.®



Configurer la thérapie V.A.C.® comme prescrit et sélectionner **OK**

Contre-indications

Ne pas mettre les pansements en mousse du système de thérapie V.A.C.ULTA™ (y compris les pansements de thérapie V.A.C.® et V.A.C. VERAFLOR™) en contact direct avec des vaisseaux sanguins, des sites anastomotiques, des organes ou des nerfs exposés.

La thérapie V.A.C.® est contre-indiquée pour les patients présentant les affections suivantes :

- Malignité dans la plaie
- Ostéomyélite non traitée
- Fistules non entériques et non explorées
- Tissus nécrotiques avec escarres (**REMARQUE** : la thérapie V.A.C.® peut être utilisée après le débridement des tissus nécrotiques et le retrait complet des escarres)
- Sensibilité à l'argent (pansements V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ uniquement)

REMARQUE : voir la section Avertissements et précautions de la fiche d'informations de sécurité pour des informations complémentaires, notamment sur les risques potentiels associés aux saignements et aux infections. Pour des informations complètes sur les indications, contre-indications et d'autres informations de sécurité, consulter le manuel d'utilisation et la fiche d'informations de sécurité.

Pour plus d'informations, contactez GD Medical au +32(0)2 808 58 80 ou visitez gdmedical.be

Remarque importante : les indications, contre-indications, avertissements, précautions et informations de sécurité importantes sont inclus dans la fiche d'informations de sécurité et dans le manuel d'utilisation du système de thérapie V.A.C.ULTA™ 4, disponibles sur acelity.com. Consulter un médecin et se reporter au mode d'emploi du produit avant toute utilisation. Ce document est destiné aux professionnels de la santé. V.A.C.ULTA™ 4 Therapy Unit is Class IIa, BSI/2797.

©Copyright 2020 3M. All rights reserved. 3M and the other marks shown are marks and/or registered marks. Unauthorized use prohibited. PRA-PM-FR-00175 (05/20)