

**Instructions pour l'application des pansements V.A.C.®.**

Pour les plaies sans vaisseaux, organes, tendons et nerfs exposés




Instructions d'utilisation et de sécurité : il s'agit d'une brève instruction expliquant les étapes de base de l'application des pansements V.A.C.®. Comme pour tout appareil, il est important de lire et de comprendre les instructions détaillées d'utilisation et de sécurité (y compris les informations sur les vaisseaux, organes, tendons, nerfs et infections exposés) applicables à votre unité de thérapie V.A.C.® et à l'application des pansements V.A.C.®.

Questions et informations : Pour des informations plus détaillées, veuillez vous référer aux informations spécifiques qui se trouvent dans l'unité de thérapie, dans le carton des pansements V.A.C.® ou dans les directives cliniques de la V.A.C.® Therapy. Ces sources fournissent des informations sur l'application correcte de tous les pansements V.A.C.® Therapy, y compris les applications et techniques avancées. Pour toute question sur les produits, veuillez contacter votre responsable de compte ou visiter [gdmedical.be](http://gdmedical.be).

Note : Des indications, contre-indications, mises en garde, précautions et informations de sécurité spécifiques existent pour les produits et thérapies 3M. Consultez un médecin et le mode d'emploi avant toute application. Ces informations sont destinées aux professionnels de la santé.


© 2022 3M. Tous droits réservés. 3M et les autres marques mentionnées sont des marques et/ou des marques déposées. Utilisation interdite sans autorisation. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs

**Étape 1 - Taux du type et de la taille de la plaie**

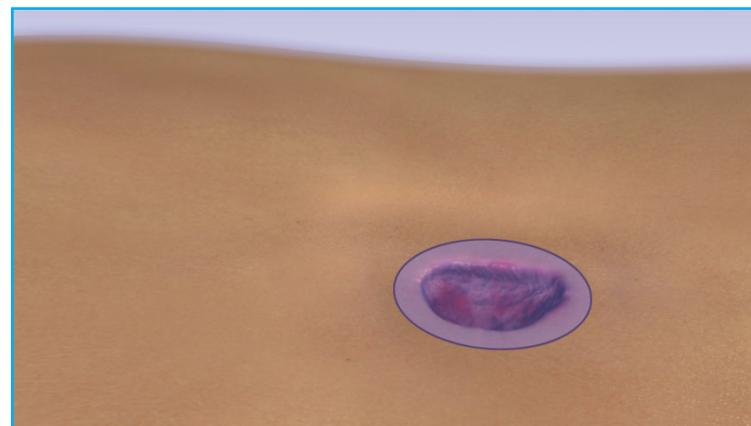

Préparer le lit de la plaie.


**Étape 2 - Couper la mousse à la bonne taille**

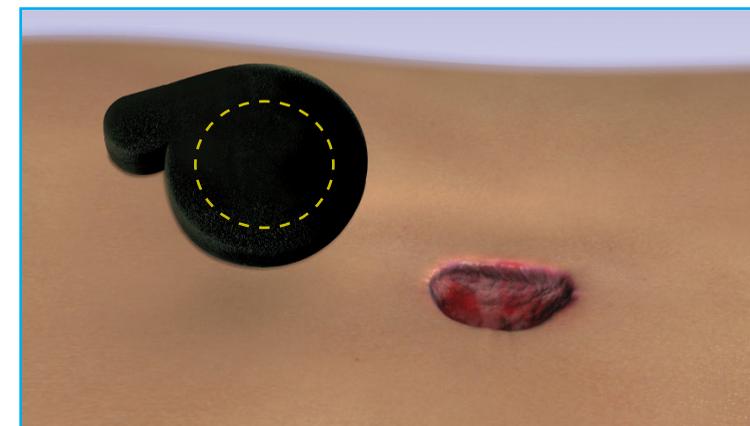

Ne pas couper la mousse au-dessus de la plaie afin d'éviter que des particules de mousse ne pénètrent dans la plaie.

*La spirale V.A.C.® Simplace™ peut être facilement ajustée à la taille.*

**Étape 3 - Placer le pansement dans la plaie**

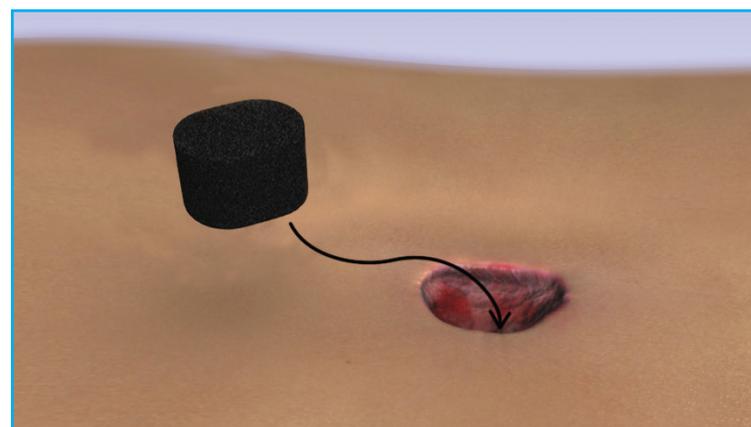


Notez le nombre de morceaux de mousse utilisés dans la plaie.

**Étape 4 - Découper le film V.A.C.® Therapy à la bonne taille**




Retirez un côté de la couche 1 et placez-la sur la plaie, la couche adhésive vers le bas. Retirez le reste de la couche 1, la couche rayée verte et les bandes bleues.

**Étape 5** - Application du SensaT.R.A.C.™ Pad

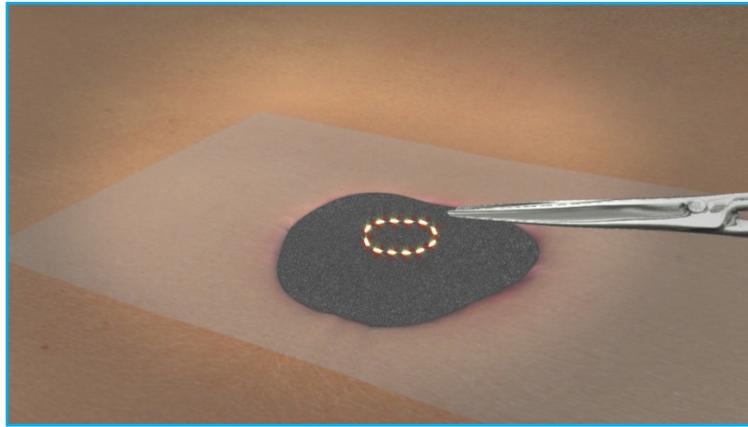


Déterminer l'emplacement du SensaT.R.A.C.™.

**Étape 6** - Pressez la feuille, tirez-la vers le haut et découpez un trou rond de 2,5 cm.

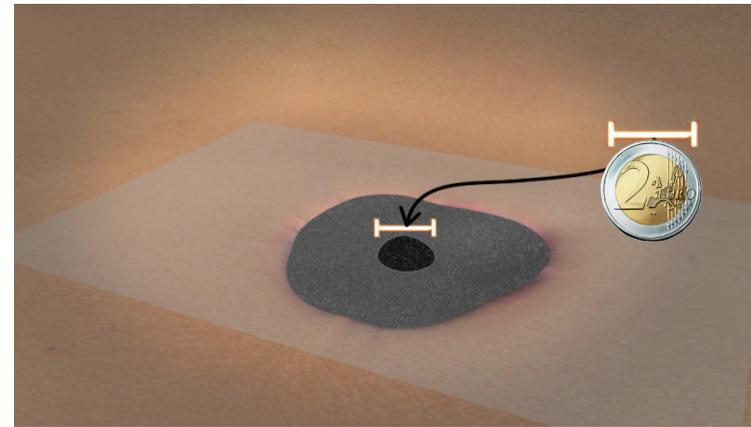


Une pièce de 2 euros est une bonne référence pour la taille.

**Étape 7** - Retirer les couches adhésives 1 et 2 du SensaT.R.A.C.™ Pad

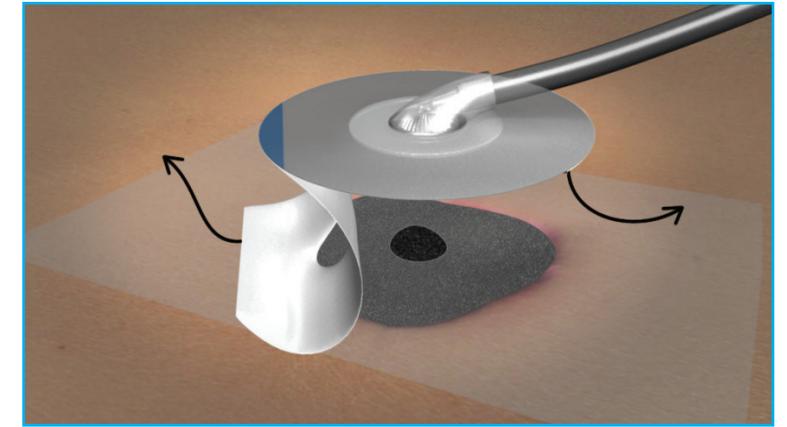

**Étape 8** - Placer l'ouverture du SensaT.R.A.C.™ Pad directement au-dessus du trou.

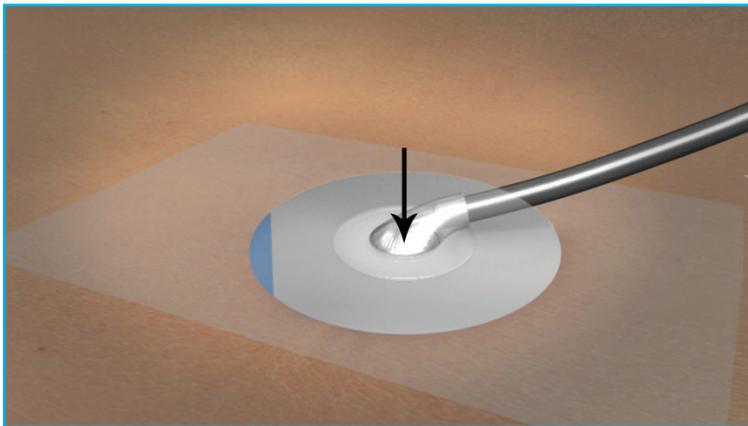


Retirez la couche de stabilisation bleue. Notez la date et le nombre de morceaux de mousse dans le dossier du patient.

**Étape 9** - Connecter le SensaT.R.A.C.™ Pad au tuyau de la réserve.



**Étape 10** - Mettre en marche l'unité de thérapie V.A.C.®.

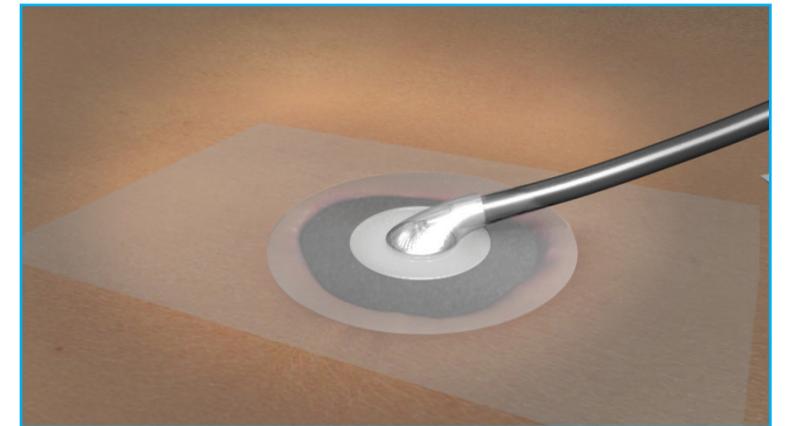

Réglez les paramètres de thérapie prescrits pour commencer la thérapie.