



Veraflo™
Therapy


Unité de thérapie 3M™ V.A.C.® Ultra 4 avec thérapie 3M™ Veraflo™

Mise en place de l'unité de thérapie

1. Maintenir le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que la lumière s'allume.
2. Lorsque l'écran de démarrage s'affiche, brancher la cassette 3M™ V.A.C.® Veralink™.



3. Déployer le bras de suspension pour conteneur de solution.
4. Raccorder et suspendre la poche/le flacon de solution.

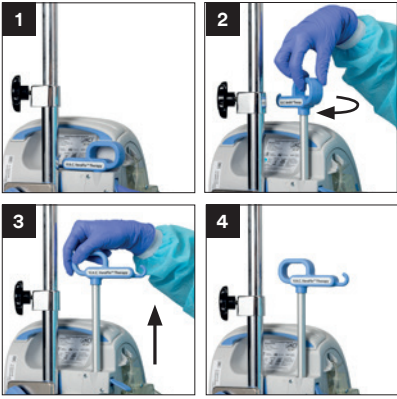

5. Raccorder la tubulure du pansement (après application du pansement). Aligner, pousser et tourner.
6. Raccorder le réservoir de 500 ou 1000 ml.



Brancher le tube d'instillation, puis le tube de thérapie 3M™ V.A.C.®.

Remarque : consulter le mode d'emploi pour des informations complètes sur l'application du pansement.

Unité de thérapie 3M™ V.A.C.® Ultra 4



Contre-indications

Ne pas mettre les pansements en mousse du système de thérapie 3M™ V.A.C.® Ultra (y compris les pansements pour thérapies 3M™ V.A.C.® et 3M™ Veraflo™) en contact direct avec des vaisseaux sanguins, des sites d'anastomose, des organes ou des nerfs exposés.

Les thérapies 3M™ V.A.C.® et 3M™ Veraflo™ sont contre-indiquées pour les patients présentant les affections suivantes :

- Plaque maligne
- Ostéomyélite non traitée
- Fistules non entériques et non explorées
- Tissu nécrotique avec escarre (Remarque : la thérapie 3M™ V.A.C.® peut être utilisée après débridement des tissus nécrotiques et retrait complet des escarres.)


Remarque : voir la section avertissements et précautions de la fiche d'informations de sécurité pour des informations complémentaires, notamment sur les risques potentiels associés aux saignements et aux infections. Pour des informations complètes sur les indications, contre-indications et d'autres informations de sécurité, consulter le manuel d'utilisation et la fiche d'informations de sécurité.

Contre-indications supplémentaires propres à la thérapie 3M™ Veraflo™ :

- Ne pas utiliser les pansements 3M™ V.A.C.® avec de l'Octenisept®, du peroxyde d'hydrogène, ou des solutions hydroalcooliques ou contenant de l'alcool
- Ne pas diffuser de liquide dans la cavité thoracique ou abdominale en raison du risque potentiel d'altération de la température corporelle et de rétention du liquide au sein de ces cavités
- Afin d'éviter toute instillation involontaire de solutions topiques de traitement des plaies dans des cavités adjacentes, la thérapie 3M™ Veraflo™ ne doit être appliquée qu'après un examen approfondi de la plaie


Installation de la thérapie 3M™ V.A.C.® Veraflo™

Écran de démarrage

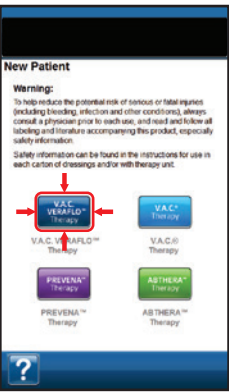

Sélectionner Veraflo™ Therapy (Thérapie Veraflo™).

Écran de configuration de la thérapie

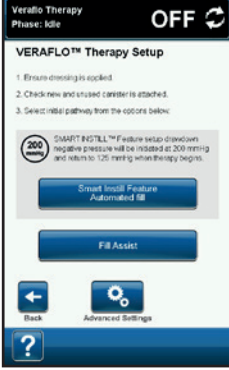

Sélectionner 3M™ Smart Instill™ Feature (Fonctionnalité 3M™ Smart Instill™).

3M™ Smart Instill™ Feature (Fonctionnalité 3M™ Smart Instill™) Étape 1




Sélectionner la taille du réservoir et confirmer que le réservoir est neuf.

3M™ Smart Instill™ Feature (Fonctionnalité 3M™ Smart Instill™) Étape 2




3M™ Smart Instill™ Feature (la fonctionnalité 3M™ Smart Instill™) déclenchera 3M™ Seal Check™ Feature (Fonctionnalité 3M™ Seal Check™).

3M™ Smart Instill™ Feature (Fonctionnalité 3M™ Smart Instill™) Étape 3

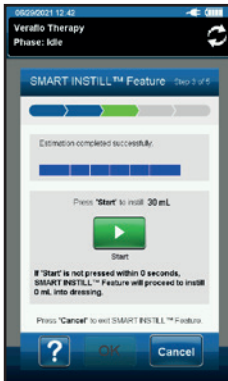

L'écran 3M™ Smart Instill™ Feature (Fonctionnalité 3M™ Smart Instill™) estimera et affichera le volume d'instillation recommandé. Si l'utilisateur ne sélectionne pas Start (Démarrer), la fonctionnalité 3M™ Smart Instill™ Feature instillera automatiquement le volume d'instillation affiché après 10 secondes.


3M™ Smart Instill™ Feature (Fonctionnalité 3M™ Smart Instill™) Étape 4

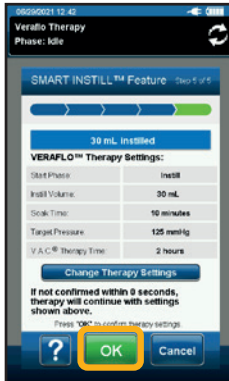

Sélectionner OK pour accepter les paramètres suggérés. La thérapie 3M™ Veraflo™ commencera automatiquement avec les paramètres affichés si l'utilisateur ne sélectionne pas OK après 10 minutes.

Caractéristiques améliorées

Thérapie 3M™ Veraflo™ – aperçu des paramètres avancés (facultatif)

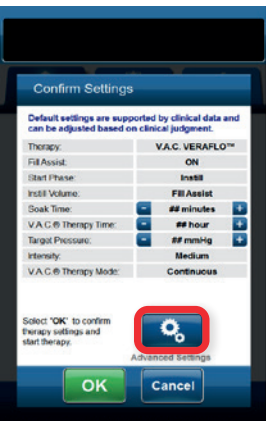

Sélectionner **Advanced settings** (Paramètres avancés).



Régler les paramètres sous **Pressure** (Pression), **Intensity** (Intensité) et **Therapy mode** (Mode thérapie). Sélectionner **OK** pour accepter les paramètres.




Désactiver le paramètre **Fill assist** (Assistant de remplissage), sélectionner **Start phase** (Phase de démarrage). Ajuster les paramètres **Instill volume** (Volume d'instillation), **Soak time** (Temps d'humidification) et **V.A.C.® Therapy time** (Durée de la thérapie de V.A.C.®).


Écrans d'information – Thérapie 3M™ Veraflo™



Sélectionner le bouton **i** sur l'écran d'accueil pour afficher l'onglet **Therapy summary** (Récapitulatif de la thérapie).

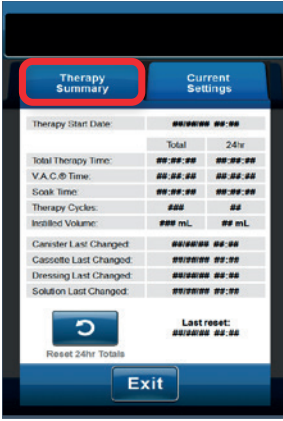

Utiliser l'onglet **Therapy summary** (Récapitulatif de la thérapie) pour afficher une synthèse cumulative de la thérapie administrée.

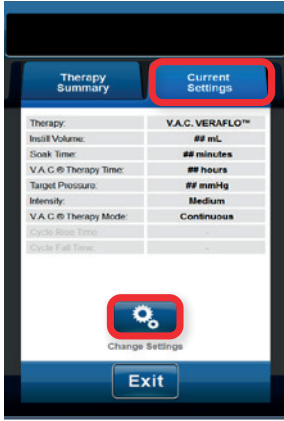

Utiliser l'onglet **Current settings** (Paramètres actuels) pour afficher les paramètres actuels de la thérapie. Sélectionner **Change settings** (Modifier les paramètres) pour afficher l'écran **Confirm settings** (Confirmer les paramètres).

Remarque : dans l'impossibilité de résoudre un état d'alarme, contactez un prestataire de santé ou un représentant local.

Remarque : des indications spécifiques, des contre-indications, des avertissements, des précautions et des informations relatives à la sécurité existent pour ces produits et thérapies. Veuillez consulter un clinicien et vous reporter au mode d'emploi du produit avant toute utilisation. Ce document est destiné aux professionnels de santé.

Octenisept® est une marque commerciale de Schulke & Mayr Gesellschaft m.b.H.
© 2023 3M. Tous droits réservés. 3M, Seal Check, Smart Instill, V.A.C., V.A.C. Veraflo et V.A.C. Veralink sont des marques commerciales de 3M Company. OMG605795.