

3M

V.A.C.® Ultra

Une technologie avancée simplifiée.

Guide de référence rapide



SYSTÈME DE THÉRAPIE V.A.C.ULTA™ 4

GD
medical

Mode d'emploi

Le système de thérapie par pression négative V.A.C.ULTA™ est un système intégré de prise en charge des plaies qui fournit une thérapie par pression négative avec une option d'instillation.

- En l'absence d'instillation, la thérapie par pression négative a pour objectif de créer un environnement qui favorise la cicatrisation des plaies en deuxième ou troisième intention (fermeture primaire retardée) en préparant le lit de la plaie pour la fermeture, en réduisant l'œdème, en favorisant la formation et la perfusion du tissu de granulation, et en retirant les exsudats et les éléments infectieux.
- L'option d'instillation est indiquée chez les patients qui peuvent bénéficier d'un drainage par pression négative et d'une diffusion contrôlée des solutions et suspensions topiques de traitement des plaies sur le lit de la plaie.

Le système de thérapie par pression négative V.A.C.ULTA™ avec ou sans instillation est indiqué chez les patients présentant des plaies chroniques, aiguës, traumatiques, subaiguës et déhiscents, des brûlures au deuxième degré, des ulcères (tels que les ulcères diabétiques, les escarres et les ulcères liés à une insuffisance veineuse), des lambeaux et des greffes.

En l'absence d'instillation, la thérapie par pression négative peut également être utilisée pour :

- La couverture temporaire de la paroi abdominale ouverte lorsqu'une fermeture primaire n'est pas possible et/ou que des interventions abdominales répétées sont nécessaires, ainsi que pour les plaies abdominales ouvertes avec exposition des viscères y compris, sans s'y limiter, le syndrome du compartiment abdominal. L'environnement de soins prévu est une zone étroitement surveillée au sein d'un service de soins aigus, par exemple un service de soins intensifs. Dans la plupart des cas, le pansement abdominal est mis en place dans le bloc opératoire,
- La prise en charge de l'environnement des incisions chirurgicales fermées et de la peau environnante intacte chez les patients à risque de développer des complications post-opératoires, comme une infection, en maintenant un environnement fermé via l'application d'un système de thérapie par pression négative à l'incision. L'interface cutanée avec argent du pansement pour incision PREVENA™ limite la colonisation microbienne dans le tissu.

Informations importantes pour les utilisateurs

Le système de thérapie par pression négative V.A.C.ULTA™ (système de thérapie V.A.C.ULTA™) est un système intégré de thérapie de plaie qui peut être utilisé pour les thérapies suivantes :

- Thérapie V.A.C. VERAFLOR™ (instillation), qui consiste en une thérapie par pression négative (thérapie V.A.C.®) associée à la diffusion contrôlée de solutions et suspensions topiques de traitement par irrigation des plaies sur le lit de la plaie, ainsi qu'à leur drainage.

OU

- Thérapie V.A.C.®, qui consiste en une thérapie par pression négative seule.
- Lors de l'utilisation de la thérapie V.A.C. VERAFLOR™ (instillation), il faut tenir compte de contre-indications, mises en garde et précautions importantes qui viennent compléter les contre-indications, mises en garde et précautions concernant la thérapie V.A.C.®. Les contre-indications, mises en garde et précautions propres à la thérapie V.A.C. VERAFLOR™ sont surlignées en gris dans l'ensemble du document et identifiées par le symbole de la thérapie V.A.C. VERAFLOR™ à gauche du texte. Lorsque la thérapie V.A.C.® est utilisée seule, les contre-indications, mises en garde et précautions de la thérapie V.A.C. VERAFLOR™ ne s'appliquent pas.
- **IMPORTANT** : comme c'est le cas avec tous les dispositifs médicaux vendus sur ordonnance, il convient de consulter un médecin, et de lire attentivement et d'observer toutes les consignes de sécurité et instructions d'application fournies avec l'unité de thérapie et les cartons de pansements avant utilisation, afin d'assurer une performance correcte du produit et d'éviter toute blessure grave ou mortelle. Ne pas modifier les paramètres de l'unité de thérapie ni appliquer la thérapie sans instructions ou supervision du personnel soignant.

Systèmes de pansement pour utilisation avec l'unité de thérapie V.A.C.ULTA™

- La thérapie V.A.C.® peut être utilisée avec tous les pansements suivants :
- Pansements V.A.C.® GRANUFOAM™
- Pansements V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™
- Pansements V.A.C. WHITEFOAM™
- Pansements pour incision PREVENA™
- Pansements pour abdomen ouvert ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™
- Pansement de gaze pour thérapie par pression négative KCI™

Contre-indications

Système de thérapie V.A.C.ULTA™

- Ne pas placer les pansements en mousse du système de thérapie V.A.C.ULTA™ (y compris les pansements de la thérapie V.A.C.® et de la thérapie V.A.C. VERAFLOR™) directement en contact avec les vaisseaux sanguins, sites anastomotiques, organes ou nerfs exposés*.
- La thérapie V.A.C.® et la thérapie V.A.C. VERAFLOR™ sont contre-indiquées chez les patients présentant :
 - » Une malignité dans la plaie,
 - » Une ostéomyélite non traitée*,
 - » Des fistules non entériques et non explorées,
 - » Un tissu nécrotique avec escarre (REMARQUE : après débridement du tissu nécrotique et retrait complet de l'escarre, il est possible d'utiliser la thérapie V.A.C.®),
 - » Une sensibilité à l'argent (pansement V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ et pansements pour incision PREVENA™ uniquement).

Contre-indications spécifiques à la thérapie V.A.C. VERAFLOR™

- Ne pas utiliser les pansements V.A.C.® avec Octenisept®**, du peroxyde d'hydrogène ou des solutions à base d'alcool ou contenant de l'alcool.
- Ne pas diffuser de liquides dans la cavité thoracique ou abdominale en raison du risque potentiel de modification de la température corporelle centrale et de la possibilité de rétention des liquides dans la cavité.
- Ne pas utiliser la thérapie V.A.C. VERAFLOR™ sans avoir soigneusement exploré la plaie au préalable au risque d'instiller accidentellement des solutions topiques pour le traitement des plaies dans les cavités corporelles adjacentes.

Transition vers les soins à domicile

- Le système de thérapie V.A.C.ULTA™ n'est pas prévu pour une utilisation à domicile.
- Si la thérapie V.A.C.® doit être poursuivie lorsqu'un patient rentre chez lui, envisager d'utiliser l'un des systèmes de thérapie KCI approuvés pour l'environnement post-aigu, notamment :
 - Unité de thérapie PREVENA™ 125***
 - Unité de thérapie PREVENA PLUS™ 125***
 - Unité de thérapie ACTIV.A.C.™
 - Unité de thérapie V.A.C. FREEDOM™
 - Unité V.A.C. SIMPLICITY™
 - Système de thérapie V.A.C.VIA™

*Voir la section Mises en garde de la Fiche d'informations de sécurité du système de thérapie V.A.C.ULTA™ pour des informations complémentaires sur le saignement et l'ostéomyélite.

**Le nom de marque mentionné n'est pas une marque commerciale de KCI, ses sociétés affiliées et/ou ses concédants de licence.


***La thérapie PREVENA™ et la thérapie PREVENA PLUS™ sont réservées aux incisions fermées.

Instauration de la thérapie V.A.C. VERAFL0™

Thérapie par pression négative avec instillation automatisée et drainage des solutions topiques de traitement des plaies, pour une utilisation avec les pansements V.A.C. VERAFL0™, V.A.C. VERAFL0 CLEANSE™ ou V.A.C. VERAFL0 CLEANSE CHOICE™.




1 Sélectionner **V.A.C. VERAFL0™** Therapy (Thérapie V.A.C. VERAFL0™) afin de configurer l'unité de thérapie pour une utilisation avec la thérapie V.A.C. VERAFL0™.

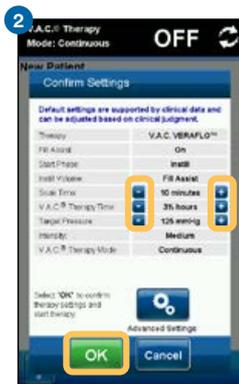


2 Des ajustements peuvent être faits dans l'écran **Confirm Settings** (Confirmer les paramètres) à l'aide des boutons +/-.

*Si aucune modification n'est nécessaire, sélectionner **OK** pour confirmer les paramètres par défaut.*

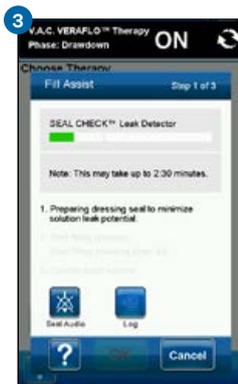


3 La procédure Fill Assist commence à abaisser le pansement pour en préparer l'étanchéité afin de réduire le risque de fuite de solution.

Il n'est plus nécessaire d'attendre l'affichage du bouton vert : l'unité de thérapie passe automatiquement à l'étape suivante lorsqu'elle est satisfaite de la fuite du pansement ou après un délai de 2 minutes et demie.

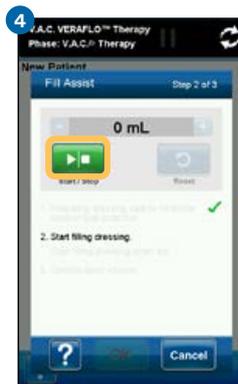

4 Sélectionner **Start/Stop** (Démarrer/Arrêter) à l'écran Fill Assist pour commencer à diffuser la solution dans la plaie. Surveiller la plaie à mesure qu'elle se remplit de solution.

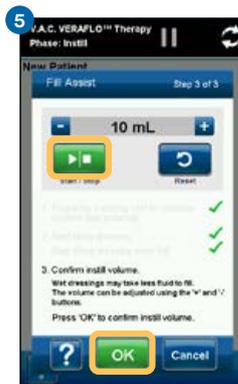

5 Pour arrêter la fonction Fill Assist, appuyer sur **Start/Stop** (Démarrer/Arrêter). Sélectionner **OK** une fois le volume d'instillation voulu atteint.

Utiliser +/- pour effectuer de petits ajustements qui seront enregistrés en mémoire.



6 Écran d'accueil – La thérapie V.A.C. VERAFL0™ est active.

Instauration de la thérapie V.A.C.®

Thérapie par pression négative conçue pour offrir les avantages de la cicatrisation des plaies de la thérapie V.A.C.® avec la technologie SENSAT.R.A.C.™ brevetée.



Sélectionner **V.A.C.®** (Thérapie V.A.C.®) pour configurer l'unité de thérapie afin qu'elle délivre une thérapie par pression négative.



La pression cible de la thérapie peut être ajustée dans l'écran **Confirm Settings** (Confirmer les paramètres) à l'aide des boutons +/-.

*Si aucune modification n'est nécessaire, sélectionner **OK** pour confirmer les paramètres par défaut : pression cible de 125 mmHg, mode de thérapie continu et faible intensité.*




Écran SEAL CHECK™ Leak Detector (Détecteur de fuite SEAL CHECK™) - Début de l'abaissement



Écran d'accueil – La thérapie V.A.C.® est active.

Instauration de la thérapie PREVENA™

Thérapie par pression négative spécialement conçue pour la prise en charge des incisions chirurgicales fermées.

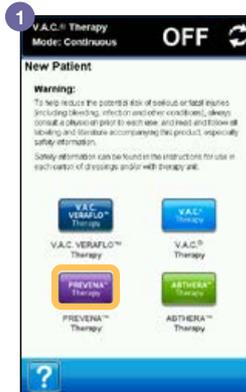

Sélectionner **PREVENA™** Therapy (Thérapie PREVENA™) afin de configurer l'unité de thérapie pour une utilisation avec la thérapie PREVENA™.



Sur l'écran **Confirm Settings** (Confirmer les paramètres), sélectionner OK pour accepter les paramètres par défaut : pression cible de 125 mmHg.




Écran **SEAL CHECK™ Leak Detector (Détecteur de fuite SEAL CHECK™) - Début de l'abaissement**




Écran d'accueil - La thérapie PREVENA™ est active.

Instauration de la thérapie par pression négative pour abdomen ouvert ABTHERA™

Thérapie par pression négative destinée à la prise en charge active de l'abdomen ouvert et à l'obtention d'une fermeture primaire de l'aponévrose avec le pansement pour abdomen ouvert ABTHERA ADVANCE™ ou le pansement pour abdomen ouvert ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™

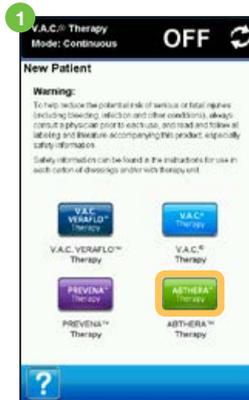

Sélectionner **ABTHERA™** Therapy (Thérapie ABTHERA™) afin de configurer l'unité de thérapie pour une utilisation avec la thérapie ABTHERA™.

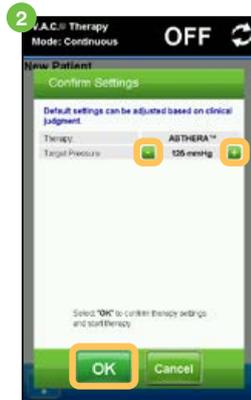

Des ajustements peuvent être faits dans l'écran **Confirm Settings** (Confirmer les paramètres) à l'aide des boutons +/-.

*Si aucune modification n'est nécessaire, sélectionner **OK** pour confirmer les paramètres par défaut.*



Écran SEAL CHECK™ Leak Detector (Détecteur de fuite SEAL CHECK™) - Début de l'abaissement



Écran d'accueil - Thérapie ABTHERA™

Si vous avez des questions supplémentaires concernant votre système de thérapie V.A.C.ULTA™, veuillez contacter GD Medical via le numéro de téléphone +32(0)2 808 58 80 ou visitez gdmedical.be.

Important : ce guide de référence rapide donne uniquement un aperçu basique. Consultez le Manuel d'utilisation du système de thérapie V.A.C.ULTA™ et la Fiche d'informations de sécurité V.A.C.ULTA™ pour obtenir des instructions détaillées, notamment des informations de sécurité importantes. Pour les urgences médicales, consultez votre médecin traitant ou appelez les urgences. Lisez attentivement et respectez l'ensemble de la documentation et de l'étiquetage qui accompagne le produit.

REMARQUE : il existe des indications, des contre-indications, des mises en garde, des précautions et des informations de sécurité particulières à ces produits et traitements. Veuillez consulter un médecin et vous reporter au mode d'emploi du produit avant toute utilisation.

©2020 3M. Tous droits réservés. 3M et les autres marques mentionnées sont des marques et/ou des marques déposées.
Utilisation interdite sans autorisation. PRA-PM-BE-00034 (08/20)

