



Veiligheidslancetten



- ✓ Gemakkelijk en veilig
- ✓ Eenmalig te gebruiken
- ✓ Prikaccidenten uitgesloten

Eenvoudig te gebruiken

- Zeer eenvoudig in gebruik: draai en druk!
- Geen prikapparaat en plaatsen/verwijderen van naalden nodig.

Prettig

- Verkrijg dezelfde hoeveelheid bloed met beduidend minder pijn.
- De gepatenteerde technologie vermindert de kracht van de activering, het geluid en de vibratie.
- De ultra-scherpe kwaliteitsnaald reduceert huidbeschadiging en pijn tot een minimum.

Veilig

- Het automatische terugtreksysteem voorkomt dat de scherpe naald, na gebruik, blootgesteld blijft. Hiermee voorkomt u dat u of iemand anders zichzelf per ongeluk prikt.

Handig

- Eenvoudig mee te nemen.

Activatie bij contact

- Consistente prikdiepte.
- Voorkomt de kans dat u de procedure moet herhalen.



1,5 mm



Omschrijving	Ht-One Veiligheidsnaald 1,5 mm
Kleurmarkering	Geel
Bloedmonster	
Inhoud	100 stuks
Onderdeelnummer	GD101226
ZI nummer	16671872
CNK code	8718692276185

1,8 mm



Omschrijving	Ht-One Veiligheidsnaald 1,8 mm
Kleurmarkering	Oranje
Bloedmonster	
Inhoud	100 stuks
Onderdeelnummer	GD100195
ZI nummer	16034333
CNK code	8718692270404

2,2 mm



Omschrijving	Ht-One Veiligheidsnaald 2,2 mm
Kleurmarkering	Paars
Bloedmonster	
Inhoud	100 stuks
Onderdeelnummer	GD100196
ZI nummer	16034341
CNK code	8718692270411

2,4 mm




Omschrijving	Ht-One Veiligheidsnaald 2,4 mm
Kleurmarkering	Blauw
Bloedmonster	
Inhoud	100 stuks
Onderdeelnummer	GD102906
ZI nummer	16989155
EAN code	8720289090241

4 typen veiligheidslancetten, geschikt voor alle toepassingsgebieden.


Gebruiksaanwijzing

1

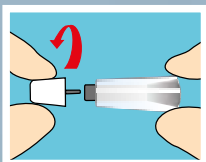


Reinig uw vingertop met alcohol. Verwijder de beschermkap van de veiligheidslancet door deze 90° te draaien.

2

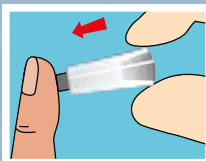


Plaats het uiteinde van de veiligheidslancet op uw vingertop.

3

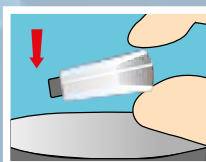

Druk zachtjes de veiligheidslancet tegen uw vingertop om het lancetmechanisme te activeren.

4

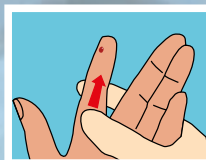

Gebruik een naaldcontainer om uw veiligheidslancet weg te gooien.

Ht one



GD Medical B.V.

Hastelweg 224

5652 CL Eindhoven

Telefoon 040-3031099

E-mail: customerservice@gdmedical.nl

www.ht-one.nl

www.gdmedical.nl

GD Medical Belgium B.V.

Priester Cuypersstraat 3

B-1040 Brussel

Telefoon 02 808 58 80

E-mail: customerservice@gdmedical.be

www.ht-one.nl

www.gdmedical.be

STERILE R



CE 1008