






V.A.C.® Therapy

Guide de choix des mousses




Comment savoir si la plaie est adaptée au traitement V.A.C.® Peel & Place ?

Vérifiez les dimensions de la plaie : notez la longueur, la largeur et la profondeur

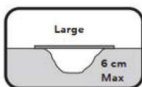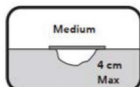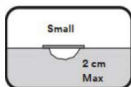

Vérifiez si la plaie présente des cavités et des tunnels

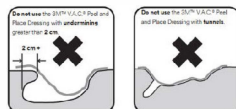

Application de V.A.C.® Peel & Place en moins de deux minutes



■ Placement et choix de la taille

Appliquez sans serrer – ne tirez pas et n'exercez aucune tension. La mousse doit dépasser les bords de la plaie.

Utilisez la taille Large avec un trou sur le côté pour maintenir le Sensa.T.R.A.C.™ Pad à l'extérieur de la plaie.

La mousse doit toujours être en contact avec toute la surface de la plaie; si ce n'est pas le cas - envisagez une taille plus grande.

CONTRÔLER



SE CONNECTER



■ Éviter toute pression sur la plaie

Placez de préférence le tampon SensaT.R.A.C.™ en dehors de la zone de la plaie. Changez/alternes la position du tampon à chaque changement. Un soulagement de la pression est-il nécessaire ? Choisissez un pansement plus grand.

■ Joint et application

Laissez un débord d'au moins 5 cm de film tout autour. Appliquez le pansement sans le serrer ; le film ne doit jamais être tendu. Sur les parties du corps courbées : découpez le film pour éviter la formation de plis. Le film peut encore être repositionné pendant les 20 premières minutes.

■ Hyperhydratation / macération

Il est normal que les bords de la plaie soient légèrement humides (hyperhydratation).

En cas d'excès d'humidité :

- Augmenter la pression (max. -150 mm Hg)
- Déplacer le pansement de manière stratégique (par exemple, en suivant la force de gravité)
- Protéger la plaie à l'aide d'une barrière ou d'un hydrocolloïde


■ Réglage de la thérapie

Thérapie continue uniquement : -75 à -150 mmHg. Maintenez la thérapie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin d'éviter la macération.

Le pansement V.AC.® Peel & Place agit différemment sur la plaie par rapport au pansement V.AC.® Granufoam™. Veuillez noter que l'aspect de la plaie sera différent. **C'est tout à fait normal et prévisible.**

L'aspect de la plaie:

- Tissu de granulation: la couleur ne sera pas d'un rouge aussi profond et la texture sera plus lisse.
- Migration périphérique: bords de la plaie moins abrupts (effet de plage) ; aucun cas d'épibole n'a été signalé
- Tissu entourant la plaie: nombreux cas d'amélioration (couleur et turgescence). Parfois, hyperhydratation (pas de macération)
- Matière protéique à la surface: dans la plupart des cas, il s'agit d'albumine
- Odeur: après 7 jours, une odeur modérée peut apparaître par rapport à 3 jours

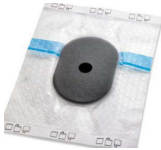

Liste de contrôle V.A.C.® Peel & Place:

- La plaie a une profondeur inférieure < 6 cm
 - L'infiltration est inférieure < 2 cm
 - Aucun tunnel n'est présent
 - La mousse est placée sur la plaie, et non à l'intérieur de celle-ci
 - La mousse dépasse tous les bords de la plaie.
- Choisir éventuellement une taille supérieure
- Durée de port jusqu'à 7 jours
 - Contact avec toute la surface de la plaie ; si ce n'est pas le cas, envisager une taille supérieure

Liste de contrôle V.A.C.® Granufoam™ :

- Plaie > 6 cm de profondeur
- Creusement > 2 cm
- Présence de tunnels ou de cavités étendues
- Des changements réguliers (toutes les 48 à 72 heures) sont recommandés



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations.
Vous pouvez également contacter notre service clientèle
BE/ LUX: customerservice@gdmedical.be

